



Ticco 2G-5



Ticco 2G



Ticco 2G-15

Előszó

Köszönjük, hogy a Drive DeVilbiss termékét választotta. Nem fog csalódní a termék kialakításában, funkcionalitásában és minőségében. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást. Fontos biztonsági információkat és értékes tippeket tartalmaznak a megfelelő használatához és gondozáshoz. Ha kérdése van, vagy további információra van szüksége, forduljon a terméket szállító Drive DeVilbiss szakkereskedőhöz.

Ez a kezelési útmutató minden fontos beállítást és kezelést tartalmaz. A legfrissebb kezelési útmutató PDF formátumban online elérhető, vagy az ügyfélszolgálatától kérhető.

A látássérült személyek számára nagyított formátumok jeleníthetők meg. A vak betegeket a kísérőjüknek kell oktatnia. A javítások és bizonyos beállítások speciális műszaki képzést igényelnek, ezért azokat az orvosi kellékek forgalmazójának kell elvégeznie.

Megfelelőségi nyilatkozat

A leírt termék esetében a DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG kijelenti, hogy megfelel az (EU) 2017/745 orvostechnikai eszközökről szóló rendeletnek.

Élettartam

Cégünk ennek a terméknek az élettartamát öt évre vállalja mindaddig, amíg a terméket rendeltetésszerűen használják, és minden karbantartási és szervizkövetelményt betartanak. Ez az élettartam jelentősen meghaladható, ha a terméket gondosan kezelik, javítják, karbantartják és használják, és a tudomány és a technológia további fejlődésén alapuló műszaki korlátok nincsenek. Az élettartam azonban jelentősen lerövidülhet a szélsőséges és nem megfelelő használat miatt. Az élettartam cégünk általi meghatározása nem jelent további garanciát.

Ártalmatlanítás

Ha már nincs szüksége a termékre, forduljon szakkereskedőjéhez, vagy vigye el a terméket a helyi hulladékgyűjtő központba.

Azonosító tábla

1 Cikkszám | 2 Cikk neve | 3 Gyártó | 4 Sorozatszám | 5 UDI kód | 6 Max. rakomány | 7 Kövesse a használati utasítást | 8 Orvosi eszköz | 9 Gyártási dátum (év-hónap)



Újrahasználat

Ez a termék újra felhasználható.

Felhívjuk figyelmét, hogy a biztonságos kezeléshez szükséges összes műszaki dokumentumot az új felhasználónak is át kell adni. A terméket a szakkereskedőnek ellenőriznie kell, meg kell tisztítania és vissza kell állítania az optimális állapotba.

Az előkészítés során mindig kövesse a gyártó utasításait; ezeket kérésre rendelkezésre bocsátjuk. A tartozékok beszerezhetők szakkereskedőjétől vagy a www.drivedevilbiss.de oldalon

Garancia



Az általunk szállított termék jótállási ideje a vásárlástól számított 24 hónap. A hibás alkatrészeket díjmentesen kicseréljük, ha kimutatható, hogy anyag- vagy gyártási hiba lép fel.

A kopásnak kitett alkatrészekre általában nem terjed ki a garancia a normál garanciális időszak alatt, kivéve, ha az alkatrészek javításra vagy cseréjére szorulnak, amely gyártási vagy anyaghiba egyértelmű, közvetlen következményeként vált szükségessé. A műszaki fejlesztések és tervezési változtatások miatt a hibák és változtatások jogát fenntartjuk.

A GARANCIA KIZÁRÁSA

A kopásnak kitett alkatrészek (többek között): gumilábak, fogantyú

A termék részei

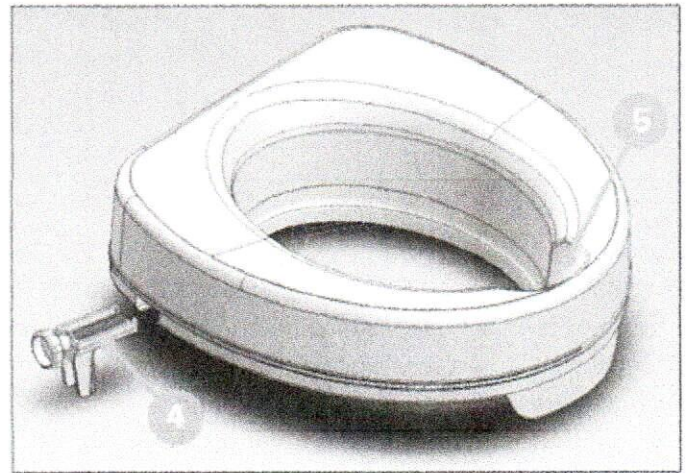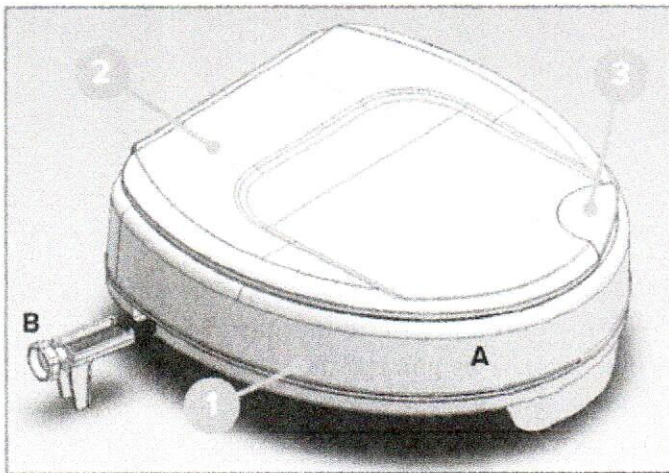

1. Test
2. Fedél
3. Süllyesztett markolat (a fedélben)
4. Rögzítő csavar
5. Higiéniiai nyílás

Jelzés

JELZÉS:

A WC-használatot akadályozza a nem adaptált ülésmagasság, a korlátozott le- és felállás, valamint a törzs korlátozott kontrollja, az alsó végtag funkcionális zavara, az ízületek jelentősen korlátozott vagy teljesen hiányzó mozgása és/vagy korlátozott izomerő. az alsó végtag és/vagy az ágyéki gerinc, a csípő és/vagy a térd károsodása és/vagy az idegrendszer/központi idegrendszer károsodása és/vagy az izomműködés károsodása a törzs stabilitásának korlátozott vagy hiánya mellett.

Szállítási terjedelem

- 1 x A test
- 2 x B Rögzítő csavarok
- 1 x Használati utasítás

Biztonsági utasítások

- Ne használja, ha bármilyen hibája van!
- Vigyázat – csúszás/leesés veszélye!
- A fedelet nyitott helyzetben háttámlaként használni tilos!
- A fedél zárt állapotban (például ráülve) nem viselhet terhelést!
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a megemelt WC-ülőke biztosan illeszkedik-e a WC-csészéhez. Szükség esetén húzza meg újra a rögzítőcsavarokat.
- Vegye figyelembe a felhasználó megengedett legnagyobb súlyát. Ez az információ megtalálható a jelen használati utasítás műszaki adatai között, valamint az adattáblán.

Használat

A Ticco megemelt WC-ülőke szinte minden szabványos vagy kereskedelmi forgalomban kapható WC-kagylóhoz alkalmas.

Montázs

- Csavarja be mindkét rögzítőcsavart az alsó oldalra (lásd a fényképet).
- Hajtsa fel a WC-ülőkét és a WC-fedelet; szükség esetén szétszerelni. Helyezze a terméket a WC-csészére. Az ütközőfülnék illeszkednie kell a WC-csésze elejéhez. Rögzítse a WC-csészéhez a jobb és a bal oldalon mindkét rögzítőcsavar segítségével.

Tisztítás | Karbantartás

- Rendszeresen tisztítsa meg nedves ruhával!
- Ne használjon agresszív tisztítószereket!
- Ne használjon súroló hatású tisztítószereket!
- Ne használjon nagy dózisu klór- és ecetalapú tisztítószert!
- A fertőtlenítéshez permetező fertőtlenítőszer használható, például Descosept AF vagy Bacillol AF.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat, és szükség esetén húzza meg.
- A terméket ne tegye ki hosszú ideig 60°C feletti hőmérsékletnek (például szaunában stb.).
- Hiba esetén forduljon ahhoz a szakkereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta.

Műszaki adatok

Product	Ticco 2G/5		Ticco 2G/10		Ticco 2G/15	
	mit Deckel	ohne Deckel	mit Deckel	ohne Deckel	mit Deckel	ohne Deckel
Model						
Article number	523600200	523600100	523400000	523300000	523600300	523600400
Overall width	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm
Overall length	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm
Height front side	5,5 cm	4,1 cm	10 cm	8,6 cm	13,6 cm	15,3 cm
Height back side	7,1 cm	5,6 cm	14,6 cm	12 cm	15,1 cm	16,6 cm
Opening length	27,3 cm	27,3 cm	28,5 cm	28,5 cm	27,3 cm	27,3 cm
Opening width	20,3 cm	20,3 cm	21,5 cm	21,5 cm	20,3 cm	20,3 cm
Weight	1,11 kg	820 g	1,35 kg	1,05 kg	1,44 kg	1,71 kg
Max. load	225 kg	225 kg	225 kg	225 kg	225 kg	225 kg
Color	white					
Material	Plastic (PP)					

Magyarországi szerviz: MEDIGOIR BT 8200 Veszpém, Bezerédi u. 2 30/9061006 info@gyogyszati.hu

Garancia 24 hónap.

Eladás kelte: _____

Eladó szerv: _____