



MOPEDIA®

UNIVERZÁLIS EMELTETT WC-ÜLÉS

Cikkszám: RP405-5, RP415-5

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



INDEX:

1. KÓDOK
2. BEVEZETÉS
3. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
4. EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
5. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK
6. SZIMBÓLUMOK
7. AZ ALKATRÉSZEK MEGTEKINTÉSE TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
9. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
10. FIGYELMEZTETÉSEK
11. MŰSZAKI JELLEMZŐK
12. ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK
13. ÁRTALMATLANÍTÁSI FELTÉTELEK
14. GARANCIA
15. JAVÍTÁS
- 15.1 Garanciális javítás
- 15.2 A garancia nem terjed ki javításra
- 15.3 Nem hibás készülék
16. ALKATRÉSZEK
17. MENTESÜLÉSEK



I. osztályú orvosi eszköz

AZ EURÓPAI PARLAMENT (EU) 2017/745 RENDELETE ÉS
A TANÁCS 2017. április 5-i rendelete az orvostechnikai eszközökről

1. KÓDOK

RP405-5 Univerzális emelt WC-ülőke (5 cm)

RP415-5 Univerzális emelt WC-ülőke fedéllel (5 cm)

2. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a Moretti MOPEDIA univerzális megemelt WC-ülőkét vásárolta, amelyeket a mozgási nehézségekkel küzdők támogatására gyártottak. Kialakításuk és minőségük maximális kényelmet, felelősséget és biztonságot garantál. A MOPEDIA by Moretti univerzális megemelt WC-ülőkét úgy tervezték és kiviteleztek, hogy minden igényt kielégítsenek. Ez a használati útmutató néhány hasznos tippet tartalmaz a megvásárolt készülék helyes használatához, valamint néhány fontos tanácsot az Ön biztonsága érdekében. Ha kétségei vannak, forduljon a viszonteladóhoz, aki tud Önnek helyesen segíteni.

3. RENDELTETÉS

A MOPEDIA univerzális megemelt WC-ülőke egy olyan eszköz, amely a mozgási nehézségekkel küzdőket segíti a wc használatában.

FIGYELEM!



- **Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben**
- **A Moretti S.p.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért.**
- **A gyártó fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.**

4. EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Moretti S.p.A. kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a Moretti S.p.A. által gyártott és forgalmazott termék, amely a RAISED TOILET SEAT - MOPEDIA csoportba tartozik, megfelel a 2017. április 5-i ORVOSI KÉSZÜLÉKEKRŐL szóló 2017/745 számú rendelet előírásainak.

Ebből a célból a Moretti S.p.A. a következőket garantálja és kizárólagos felelősségére kijelenti:

1. Az eszközök megfelelnek a 2017/745/EK rendelet I. mellékletében megkövetelt általános biztonsági és teljesítménykövetelményeknek, a fent említett rendelet IV. mellékletében meghatározottak szerint.
2. A készülékek NEM MÉRŐMŰSZEREK.
3. Az eszközök NEM KLINIKAI VIZSGÁLATHOZ KÉSZÜLT.
4. A készülékek NEM STERIL DOBOZBA vannak csomagolva.
5. Az eszközök a fent említett rendelet VIII. mellékletének rendelkezései szerint az I. osztályba tartoznak
6. A Moretti S.p.A. az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja a 2017/745 rendeletnek való megfelelést igazoló műszaki dokumentációt az utolsó tételgyártástól számított legalább 10 évig.

Megjegyzés: A teljes termékkódokat, a gyártó regisztrációs kódját (SRN), az UDI-DI kódot és a használt előírásokra való hivatkozásokat az EU megfelelési nyilatkozat tartalmazza, amelyet a Moretti S.p.A. bocsát ki és tesz elérhetővé csatornáin keresztül.

5. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használata előtt OLVASSA EL figyelmesen a teljes kézikönyvet.

- Győződjön meg arról, hogy a terméket hiánytalanul szállítja, és tartsa hőforrásoktól távol
- Javasoljuk, hogy egy betegnél használja
- A készüléket minden használat előtt és után fertőtleníteni kell
- HASZNÁLATI ÉRTÉK Az eszköz használati korlátját a nem javítható/cserélhető alkatrészek kopása határozza meg. Az élettartam korlátja semmi esetre sem lehet hosszabb 10 évnél

• NE engedje, hogy gyermekek játsszanak vagy kezeljék a készüléket

• A felhasználónak és/vagy a páciensnek jelentenie kell minden, az eszközzel kapcsolatos súlyos balesetet a gyártónak és azon állam megfelelő hatóságának, amelyhez a felhasználó és/vagy a beteg tartozik.

- Ne használja a terméket, ha hibás
- Vigyázat – Csúszás/esés veszélye
- A nyitott fedelet nem szabad háttámlaként használni
- A zárt fedelet nem szabad terhelésnek kitenni
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a WC-ülőke szilárdan felfekszik-e a WC-re, és szilárdan a WC-n. Szükség esetén húzza meg a rögzítőcsavarokat.

6. SZIMBÓLUMOK



Termékkód



Egyedi eszközazonosító



CE jelölés



Gyártó



Tétel szám



Olvassa el a használati útmutatót



Orvosi eszköz



Ártalmatlanítási feltételek

7. ALKATRÉSZNÉZET



(A képek illusztrációk)

8. TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

1. Helyezze be az oldalsó tartókat a következő módon: fordítsa fejjel lefelé a Mopedia univerzális megemelt WC-ülőkét és helyezze egy sík felületre. Helyezze be a konzolokat a megfelelő oldalsó helyekre. Nyomja meg őket, és forgassa el a csavar fogantyúját az óramutató járásával megegyező irányba, hogy blokkolja a megemelt WC-ülőke konzoljait. Helyezze a konzolokat a legkülső részbe, hogy elkerülje a megemelt WC-ülőke helyzetével kapcsolatos problémákat.



FIGYELEM!

Ha a gomb lazán forog: nyomja jól a tartót a megemelt WC-ülőkébe öntött menethez, miközben állandó nyomást gyakorol a gombra. A csavar és a menet közötti érintkezés biztosítása érdekében.

N.B. Ebben a szakaszban ne húzza meg a konzolokat, különben nem lehet a MOPEDIA megemelt WC-ülőkét felfelé helyezni a WC-csészére

2. Emelje fel a fedelet és a WC-ülőkét, és tegye a Mopedia univerzális megemelt WC-ülőkét a kerámiára.

A konzolokat a WC hátsó részéhez kell fordítani. Ügyeljen arra, hogy a belső szegély a WC belsejében, az elülső szegély pedig kívül legyen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megemelt toi ülőke illeszkedjen a kerámiához

N.B. A megemelt WC-ülőke tökéletesen sík helyzetben legyen a WC-csészén

3. Forgassa el a konzolok fogantyúit az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a MOPEDIA megemelt WC-ülőke jól rögzül, és nem lehet mozgatni



FIGYELEM!

Az oldalsó zárrendszert kifejezetten úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a könnyű meghúzást, ezért a forgatást nem szabad folytatni, ha ellenállást érez.

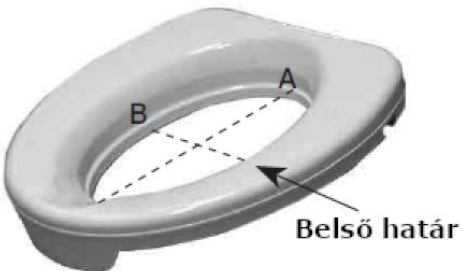
9. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Rendszeresen tisztítsa kézzel, nedves ruhával
- Ne használjon agresszív tisztítószeret
- Ne használjon súroló hatású tisztítószeret
- Ne használjon magas klór- vagy ecettartalmú tisztítószeret
- A fertőtlenítéshez alkohol alapú fertőtlenítő spray használható.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat, és szükség esetén húzza meg
- A terméket nem szabad hosszú ideig 60 °C feletti hőmérsékletnek kitenni (pl. szaunában stb.)
- Hiba esetén forduljon ahhoz a kereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta.

10. FIGYELMEZTETÉSEK

- A megemelt WC-ülőke nem használható 225 kg-nál nagyobb teher elviselésére
- Győződjön meg róla, hogy a WC-ülőke biztonságosan a helyén van, mielőtt súlyt helyez rá. A megemelt WC-ülőkét havonta ellenőrizni kell, hogy biztosan illeszkedjen
- Ne tartsa a WC-ülőkét támaszként, amikor fel- vagy leszáll a WC-re

11. MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kódok	RP405-5 RP 415-5
Külső méretek	 Hossz: 39 cm
	 Szélesség: 39 cm
Belső határ  (A kép illusztráció)	A: 27,3 cm B: 20,3 cm
Maximális teherbírás:	225 kg

12. ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

Pótalkatrészek és tartozékok a Moretti mesterkatalógusban találhatók

-RP431 csavarkészlet

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI FELTÉTELEK



A készülék ártalmatlanításakor soha ne használja a települési szilárd hulladék normál visszavezető rendszerét.

Ehelyett javasolt a közös önkormányzati ökológiai szigetekeken keresztül történő ártalmatlanítás a felhasznált anyagok várható újrahasznosítási műveleteihez.

14. GARANCIA

A Moretti termékekre a vásárlás dátumától számított (két) 2 éves garanciát vállalunk az anyag- vagy gyártási hibákra, az alábbiakban meghatározott korlátozások és kizárások mellett. A jótállás nem vonatkozik a termék nem rendeltetésszerű használatából, visszaéléséből vagy módosításából eredő károkra, a használati utasítás szigorú be nem tartása esetén a garancia nem érvényes. A készülék rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük.

A Moretti nem vállal felelősséget a személyi sérülésből vagy a helytelen telepítésből vagy nem megfelelő használatból eredő vagy más módon okozott károkért. Moretti A Moretti nem vállal garanciát a termékekre a sérülések vagy hibák ellen a következő körülmények között: természeti katasztrófa, nem engedélyezett

karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák miatti károk (ha van), nem a Moretti által szállított pótalkatrészek használata, nem megfelelő használat, nem engedélyezett átalakítás, szállítási sérülések (a Moretti eredeti szállításán kívül), vagy a kézi. A garancia nem vonatkozik azokra az alkatrészekre, amelyek a készülék helyes használata során elhasználódnak.

15. JAVÍTÁS

15.1 Garanciális javítás

Abban az esetben, ha a Moretti termék a jótállási idő alatt anyag- vagy gyártási hibába ütközik, a Moretti megerősíti az ügyféllel, hogy a hiba fedezhető-e a jótállásból.

A Moretti saját belátása szerint megjavíthatja vagy kicserélheti a garanciális tételt egy Moretti-kereskedőnél vagy a Moretti telephelyén. A javítás munkadíját a Moretti terhelheti, ha a javításra garancia vonatkozik. A javítás vagy csere nem újítja meg vagy hosszabbítja meg a garanciát.

15.2 A garancia nem terjed ki a javításra

A garancia hatálya alá nem tartozó terméket csak a Moretti ügyfélszolgálatának előzetes engedélye után lehet javításra visszaküldeni. A jótállás hatálya alá nem tartozó javítások munka- és szállítási költségei teljes mértékben a vásárlót vagy a kereskedőt terhelik. A jótállás hatálya alá nem tartozó termékek javítására a termék megjavításának kézhezvételétől számított hat (6) hónapos jótállás vonatkozik.

15.3 Nem hibás készülék



A vásárlót értesítjük, ha a visszaküldött termék megvizsgálása és tesztelése után a Moretti azt állítja, hogy a termék nem hibás. Ebben az esetben az árut visszaküldjük a vevőnek, a szállítási költséget a vásárló fizeti.

16. ALKATRÉSZEK

Az eredeti Moretti pótalkatrészekre a kézhezvételtől számított 6 (hat) hónap garanciát vállalunk.

17. MENTESÜLÉSEK

A jelen jótállásban kifejezetten meghatározott esetek kivételével és a törvény korlátaiban belül, a Moretti nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos képviselést, garanciát vagy feltételt, beleértve az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a jogsértésekre és a jogsértésekre vonatkozó nyilatkozatokat, garanciákat vagy feltételeket. A Moretti nem garantálja, hogy a Moretti termék használata zavartalan vagy hibamentes lesz. A törvény által előírt vélelmezett jótállás időtartama a jótállási időszakra korlátozódik, a törvényi keretek között. Egyes államok nem engedélyezik a vélelmezett jótállás időtartamának korlátozását, illetve a fogyasztóknak szánt termékekkel kapcsolatos véletlen vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását. Ilyen államokban vagy országokban előfordulhat, hogy a jelen jótállás bizonyos felelősség kizárásai és korlátozásai nem vonatkoznak Önre. Ez a garancia előzetes értesítés nélkül megváltozhat.



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN ROMANIA

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 - Melegto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com

